

# Les BONS GESTES DE 1<sup>ère</sup> URGENCE : AMPOULES OUVERTES avec COALGAN® POUDRE + ADHÉSIF



1

LAVEZ-VOUS LES MAINS  
soigneusement.



3

RETIREZ LE CAPUCHON PROTECTEUR DE  
COALGAN® POUDRE  
et gardez-le pour  
refermer le flacon  
après chaque  
utilisation.



2

NETTOYEZ L'AMPOULE  
avec de l'eau et du savon ou du  
sérum physiologique (NaCl à 0.9 %).



4

SAUPOUDREZ COALGAN®  
POUDRE sur l'ampoule en  
exerçant une série de pressions sur le flacon et  
répartissez la poudre sur l'ensemble de l'ampoule  
ouverte en la recouvrant complètement.




5

REFERMEZ LE FLACON et LAISSEZ LA POUDRE AGIR  
durant 2 à 3 minutes de manière à  
ce qu'elle se solidifie sur la plaie.  
L'excédent de poudre tombera  
naturellement.



6

RECOUVRER L'AMPOULE OUVERTE AVEC  
COALGAN® ADHÉSIF. Sortez le de  
son emballage en le tenant par  
les extrémités. Ne touchez pas  
la compresse bio-active.

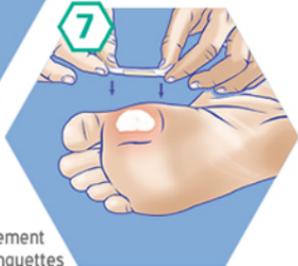

7

POSEZ COALGAN® ADHÉSIF directement  
sur la plaie en vous servant des languettes  
latérales et exercez une légère pression durant quelques secondes.  
Lors du retrait laissez fibres restantes dans la plaie qui disparaîtront  
naturellement avec la croûte.



Ouvrez,  
poudrez et pansez,  
continuez...

MENTIONS OBLIGATOIRES : Coalgan® POUDRE, ADHÉSIF et COMPRESSE est une gamme de médication familiale destinée à l'hémostase et la cicatrisation. Indiquée pour les plaies superficielles et les saignements de nez. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Si le saignement persiste et/ou la plaie ne cicatrise pas demander conseil à un pharmacien ou consulter un médecin. Pour une information complète et un bon usage, consulter la notice. Ces dispositifs médicaux sont développés et fabriqués en France par Les Laboratoires Brothier, 41 rue de Neuilly, 92735 Nanterre cedex (France), RCS Nanterre B 572 156 305. - NET16COG01 A. Ils ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale.