

# Les BONS GESTES DE 1<sup>ère</sup> URGENCE : ÉRYTHÈMES avec COALGAN® POUDRE



Ouvrez,  
poudrez,  
continuez...



1

LAVEZ-VOUS LES MAINS  
soigneusement.



2

TAMPONNEZ L'ÉRYTHÈME  
avec une compresse ou un  
linge propre pour éponger le sang écoulé.



3

NETTOYEZ LES FESSES  
du bébé avec de l'eau  
et du savon ou du  
sérum physiologique



4

RETIREZ LE CAPUCHON  
PROTECTEUR DE COALGAN® POUDRE et gardez-le  
pour refermer le flacon après chaque utilisation.




5

SAUPOUDREZ COALGAN® POUDRE sur  
les fesses en exerçant une série de  
pressions sur le flacon et répartissez  
la poudre sur l'ensemble ds lésions  
en la recouvrant complètement.



6

REFERMEZ LE FLACON  
avec le capuchon protecteur.

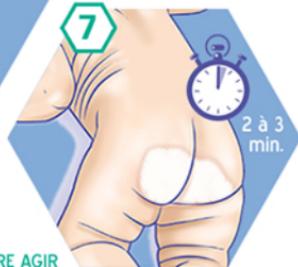

7

2 à 3  
min.

LAISSEZ LA POUDRE AGIR

durant 2 à 3 minutes de manière à ce qu'elle se solidifie sur la plaie. L'excédent de poudre tombera naturellement. N'essayez pas de retirer la poudre de la plaie, elle partira avec la croûte.

MENTIONS OBLIGATOIRES : Coalgan® POUDRE, ADHÉSIF et COMPRESSE est une gamme de médication familiale destinée à l'hémostase et la cicatrisation, indiquée pour les plaies superficielles et les saignements de nez. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Si le saignement persiste et/ou la plaie ne cicatrise pas demander conseil à un pharmacien ou consulter un médecin. Pour une information complète et un bon usage, consulter la notice. Ces dispositifs médicaux sont développés et fabriqués en France par Les Laboratoires Brothier, 41 rue de Neuilly, 92735 Nanterre cedex (France), RCS Nanterre B 572 156 305. - NET16COG01 A. Ils ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale.