

Les BONS GESTES DE 1^{ère} URGENCE : COUPURES ET PETITES PLAIES avec COALGAN® ADHÉSIF



Ouvrez,
insérez,
continuez...



1

LAVEZ-VOUS LES MAINS
soigneusement.



2

TAMPONNEZ LA PLAIE
avec une compresse
ou un linge propre pour
éponger le sang écoulé.



3

NETTOYEZ LA PLAIE avec de
l'eau et du savon ou du
sérum physiologique
(NaCl à 0,9 %).



4

SORTEZ COALGAN® ADHÉSIF
de son emballage en le tenant soigneusement par les
extrémités. Ne touchez pas la compresse bio-active.



5

POSEZ COALGAN® ADHÉSIF directement sur la
plaie en vous servant des languettes latérales
et exercez une légère pression durant
quelques secondes



6



7

LE PANSEMENT doit être changé
tous les jours afin de suivre l'évolution de la plaie.

MENTIONS OBLIGATOIRES : Coalgan® POUDRE, ADHÉSIF et COMPRESSE est une gamme de médication familiale destinée à l'hémostase et la cicatrisation, indiquée pour les plaies superficielles et les saignements de nez. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Si le saignement persiste et/ou la plaie ne cicatrise pas demander conseil à un pharmacien ou consulter un médecin. Pour une information complète et un bon usage, consulter la notice. Ces dispositifs médicaux sont développés et fabriqués en France par Les Laboratoires Brothier, 41 rue de Neuilly, 92735 Nanterre cedex (France), RCS Nanterre B 572 156 305. - NETI6COG01 A. Ils ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale.