

Les BONS GESTES DE 1^{ère} URGENCE : SAIGNEMENTS DE NEZ avec COALGAN® COMPRESSE



1

LAVEZ-VOUS LES MAINS
soigneusement.



2

PENCHEZ-VOUS EN AVANT
et mouchez-vous pour éliminer tout caillot.



3

DÉCHIREZ DÉLICATEMENT LE SACHET
DE COALGAN® COMPRESSE
dans le sens de la longueur
et extraire la compresse
stérile bio-active.



4

IMPRÉGNEZ
COALGAN® COMPRESSE
de sérum physiologique (NaCl à 0.9%) pour
la rendre plus souple et roulez-la dans le sens
de la largeur pour obtenir une mèche compacte.



5

INSÉREZ LA MÈCHE ainsi obtenue avec
Coalgan® Compress
dans la narine.



6

PINCEZ LES 2 NARINES pendant
10 minutes en laissant
la bouche ouverte.



7

Laissez
en place
30 min.

MENTIONS OBLIGATOIRES : Coalgan® POUDRE, ADHÉSIF et COMPRESSE est une gamme de médication familiale destinée à l'hémostase et la cicatrisation, indiquée pour les plaies superficielles et les saignements de nez. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Si le saignement persiste et/ou la plaie ne cicatrise pas demander conseil à un pharmacien ou consulter un médecin. Pour une information complète et un bon usage, consulter la notice. Ces dispositifs médicaux sont développés et fabriqués en France par Les Laboratoires Brothier, 41 rue de Neuilly, 92735 Nanterre cedex (France), RCS Nanterre B 572 156 305. - NET6COG01 A. Ils ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale.

LAISSEZ COALGAN® COMPRESSE

dans la narine pendant 30 minutes. Ensuite, retirez la compresse et utilisez le sachet pour la jeter. Les éventuelles fibres restantes au retrait se résorberont