

Ouvert le :

Coalgan® Poudre

stop saignement & action cicatrisante


CE 0459 Depuis 2014

Les Laboratoires BROTHIER
41, rue de Neuilly - 92735 Nanterre Cedex, France
www.brothier.com
www.coalgan-gamme.com

STERILE

MODE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE

CAPUCHON DE FERMETURE



Ne pas utiliser si le capuchon n'est pas scellé lors de la première utilisation.

0 800 355 153 Service & appel gratuits
info@brothier.com

N20COG01A - octobre 2020

ORIGINE 100% VÉGÉTALE

EXISTE AUSSI EN PANSEMENT ET EN COMPRESSE



Coalgan® ADHÉSIF
Coupsures
Ampoules ouvertes
Petites Plaies


Coalgan® COMPRESSE
Saignements de nez, buccaux,
des plaies superficielles
et des zones très vascularisées
Brûlures superficielles
et suintantes

TIRER ICI POUR LIRE LA NOTICE

Coalgan® Poudre

stop saignement & action cicatrisante

Coupsures, écorchures
Erythèmes fessiers
Plaies du cuir chevelu




Poudre héparine

3-401521-069908

ORIGINE 100% VÉGÉTALE

MODE D'UTILISATION

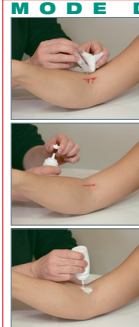

Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon ou du sérum physiologique (NaCl à 0,9%).

Enlever le capuchon à ailettes comme indiqué sur le schéma ci-contre et le conserver car il vous servira à reboucher le flacon après utilisation.

Saupoudrer Coalgan® Poudre sur la plaie ou dans la coupure. L'excédent de poudre tombe naturellement.
Recouvrir la plaie avec un Coalgan®ADHÉSIF, si nécessaire.
Ne pas essayer de retirer la poudre de la plaie, cette dernière sera éliminée avec le caillot sanguin (crouûte).

COMPOSITION / PROPRIÉTÉS

Coalgan® Poudre est composée de poudre d'alginate de calcium® bio-active et stérile. **Issu d'algues marines.*

- ↳ Arrête le saignement
- ↳ Favorise la cicatrisation

INDICATIONS

Saignement et cicatrisation des plaies cutanées superficielles :

- Coupures, écorchures
- Erythèmes fessiers suintants
- Plaies du cuir chevelu

CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES

Aucun connu à ce jour.

INTERACTIONS

Coalgan® Poudre ne doit pas être utilisée avec des solutions alcalines, telles que les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivre. Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec du sérum physiologique (NaCl à 0,9%) avant d'appliquer Coalgan® Poudre.

CONSERVATION

Coalgan® Poudre peut être utilisée pendant 6 mois après ouverture. Conserver dans un endroit sec, à une température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière.
Respecter la date limite d'utilisation.