

Les BONS GESTES DE 1^{ère} URGENCE : SAIGNEMENTS BUCAUX avec COALGAN® COMPRESSE



Ouvrez,
insérez,
continuez...



1

LAVEZ-VOUS LES MAINS
soigneusement.



2

TAMPONNEZ LA PLAIE
avec une compresse
ou un linge propre pour
éponger le sang écoulé.




3

DÉCHIREZ DÉLICATEMENT LE SACHET
DE COALGAN® COMPRESSE
dans le sens de la longueur
et extraire la compresse
stérile bio-active.



4

APPLIQUEZ
COALGAN® COMPRESSE
sur la plaie en exerçant une légère pression
pendant 2 à 3 min jusqu'à ce que le saignement cesse.

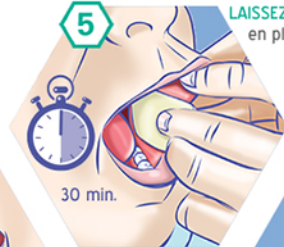

5

LAISSEZ COALGAN® COMPRESSE
en place pendant 30 minutes.



6

PUIS RETIREZ COALGAN® COMPRESSE
et utilisez le sachet pour la jeter.
Les éventuelles fibres restantes
au retrait se résorberont
naturellement.

MENTIONS OBLIGATOIRES : Coalgan® POUDRE, ADHÉSIF et COMPRESSE est une gamme de médication familiale destinée à l'hémostase et la cicatrisation. Indiquée pour les plaies superficielles et les saignements de nez. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Si le saignement persiste et/ou la plaie ne cicatrise pas demander conseil à un pharmacien ou consulter un médecin. Pour une information complète et un bon usage, consulter la notice. Ces dispositifs médicaux sont développés et fabriqués en France par Les Laboratoires Brothier, 41 rue de Neuilly, 92735 Nanterre cedex (France). RCS Nanterre B 572 156 305. - NET16COGO1 A. Ils ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale.