

Les BONS GESTES DE 1^{ère} URGENCE : PLAIES DANS LES ZONES DIFFICILES D'ACCÈS avec COALGAN® POUDRE



Ouvrez,
poudrez,
continuez...



1

LAVEZ-VOUS LES MAINS
soigneusement.



2

TAMPONNEZ LA PLAIE
avec une compresse
ou un linge propre pour
éponger le sang écoulé.



3

NETTOYEZ LA PLAIE avec de
l'eau et du savon ou du
sérum physiologique
(NaCl à 0,9 %).



4

RETIREZ LE CAPUCHON
PROTECTEUR DE COALGAN® POUDRE et gardez-le
pour refermer le flacon après chaque utilisation.



5

SAUPOUDREZ COALGAN® POUDRE
sur la plaie en exerçant une série de
pressions sur le flacon et répartissez
la poudre sur l'ensemble de la plaie
en la recouvrant complètement.



6

RÉFERMEZ LE FLACON
avec le capuchon protecteur.



7

2 à 3 min.

LAISSEZ LA POUDRE AGIR

durant 2 à 3 minutes de manière à ce qu'elle se solidifie sur la plaie. L'excédent de poudre tombera naturellement. N'essayez pas de retirer la poudre de la plaie, elle partira avec la croûte.

MENTIONS OBLIGATOIRES : Coalgan® POUDRE, ADHESIF et COMPRESSE est une gamme de medication familiale destinée à l'hémostasie et la cicatrisation. Indiquée pour les plaies superficielles et les saignements de nez. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Si le saignement persiste et/ou la plaie ne cicatrise pas demander conseil à un pharmacien ou consulter un médecin. Pour une information complète et un bon usage, consultez la notice. Ces dispositifs médicaux sont développés et fabriqués en France par Les Laboratoires Brothier, 41 rue de Neuilly, 92735 Nanterre cedex (France), RCS Nanterre B 572 156 305. - NET6COG01 A. Ils ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale.